

procedures smh

Beheer steriele medische hulpmiddelen op de verpleeg- en behandelafdelingen.

Opslag en verwerking

Versie : 05-05-10	Vervangt versie :	Geldig m.i.v. : 05-05-10
Opsteller : Syb Beeksma		Pag. 1 van 4

Goedkeuringen :	Datum:	Paraaf:
Bedrijfsleider Afdeling :		
DSMH OLVG :		

1. Algemeen

Voor de opslag en verwerking van steriele medische hulpmiddelen zijn voorschriften opgesteld door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, gerelateerd aan het Besluit Gesteriliseerde Hulpmiddelen in Ziekenhuizen . Deze voorschriften zijn bindend voor alle betrokkenen.

Steriele medische hulpmiddelen mogen na het verstrijken van de vervaldag niet meer gebruikt worden, omdat materiaaleigenschappen en steriliteit na de vervaldatum niet meer gegarandeerd kunnen worden.

Bij steriele medische hulpmiddelen is het besmettingsrisico bepalend voor de houdbaarheid van het product. De kans op besmetting wordt verminderd (en daarmee de houdbaarheidstermijn verlengd) door:

- 1) Een goede verpakking
- 2) Een juiste wijze van transport en opslag
 - beschadiging van verpakking vermijden
 - het aantal micro-organismen in de opslagruimte en tijdens transport zo laag mogelijk houden
- 3) Een goede werkwijze op de gebruikslocatie

2. Verantwoordelijkheden:

2.1 Afdelingsleiding : de leidinggevende is verantwoordelijk voor het naleven van de onderstaande procedure voor de eigen afdeling.

2.2 Medewerkers afdeling : voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens onderstaande procedure.

Beheer steriele medische hulpmiddelen op de verpleeg- en behandelafdelingen.

Opslag en verwerking

Versie	: 05-05-10	Vervangt versie :	Geldig m.i.v. : 05-05-10
Opsteller	: Syb Beeksma		Pag. 2 van 4

3. Procedure

3.1 Voorraadkasten

- 3.1.1 Steriele medische hulpmiddelen die alleen beschermd zijn door hun direct omsluitende verpakking en steriele medische hulpmiddelen in meervoudige verpakking of bundelverpakkingen moeten worden opgeslagen in de hiervoor bestemde kasten.
- 3.1.2 De kast moet kunnen worden afgesloten en vervaardigd zijn van goed te reinigen materiaal.
- 3.1.3 De voorraadkast moet herkenbaar zijn als zijnde bestemd voor steriele medische hulpmiddelen.
- 3.1.4 De kast moet geplaatst zijn in dienstruimten welke geen verhoogd contaminatierisico hebben.
- 3.1.5 De omvang van de voorraad moet zo beperkt mogelijk worden gehouden en wordt hiertoe minimaal eenmaal per week aangevuld.
- 3.1.6 Vermeden moet worden dat in de kast voor steriele medische hulpmiddelen in direct omsluitende verpakking andere, niet-steriele, producten worden opgeslagen op een manier welke verwisseling in de hand werkt.
- 3.1.7 Om beschadiging van de verpakkingen te voorkomen, moeten alle steriele medische hulpmiddelen in direct omsluitende verpakking gesorteerd, met voldoende tussenruimte en op overzichtelijke wijze worden opgeslagen.
- 3.1.8 Sondes, katheters en dergelijke niet-stapelbare artikelen moeten in onderling gescheiden vakken, rekken of schappen worden opgeslagen.
- 3.1.9 Plakbandjes, elastiekjes, veiligheidsspelden of nietjes en dergelijke mogen niet worden gebruikt om steriele medische hulpmiddelen in direct omsluitende verpakking bij elkaar te houden.

Beheer steriele medische hulpmiddelen op de verpleeg- en behandelafdelingen.

Opslag en verwerking

Versie : 05-05-10	Vervangt versie :	Geldig m.i.v. : 05-05-10
Opsteller : Syb Beekma		Pag. 3 van 4

3.1.10 Het gebruik moet plaatsvinden volgens het "first in first out" (oudste artikel eerst gebruiken) principe.

3.1.11 Bij het aanvullen van de voorraadkast moet worden gecontroleerd op eventuele beschadiging van de direct omsluitende verpakkingen en de expiratedata van de steriele medische hulpmiddelen. Expiratedata moeten hiernaast tenminste 1 maal per maand worden gecontroleerd.

3.2 Verband- en Behandelwagens

3.2.1 De omvang van de voorraad in verband- en behandelwagens moet beperkt zijn en bij voorkeur niet groter dan voor 24 uur. Tijdens opslag in verband- en behandelwagens is het risico voor contaminatie en beschadiging van steriele medische hulpmiddelen namelijk verhoogd.

3.2.2 Indien de wagen niet in gebruik is, moet deze onder voldoende toezicht worden geplaatst in dienstruimten welke geen verhoogd contaminatierisico hebben.

3.2.3 Verband- en behandelwagens mogen niet in zogenaamde "isolatiekamers" worden binnengereden of geplaatst.

3.2.4 Zakken of bakken aan de wagens voor het terugnemen van gebruikt verband of instrumentarium moet zoveel mogelijk worden vermeden. Via vieze of te volle zakken of bakken is besmetting van de steriele voorraad mogelijk.

3.2.5 De wagens moeten wekelijks worden gereinigd. De steriele medische hulpmiddelen mogen pas worden teruggelegd als de wagen geheel droog is.

3.2.6 Bij de bevoorrading moeten de eventueel nog overgebleven steriele medische hulpmiddelen vooraan of bovenop worden geplaatst, zodat deze bij een volgende ronde het eerst worden gebruikt.

3.2.7 Steriele medische hulpmiddelen mogen nooit vanuit een verband- of behandelwagen in de voorraadkast worden teruggelegd.

Beheer steriele medische hulpmiddelen op de verpleeg- en behandelafdelingen.

Opslag en verwerking

Versie : 05-05-10	Vervangt versie :	Geldig m.i.v. : 05-05-10
Opsteller : Syb Beekma		Pag. 4 van 4

3.3 Verwerking van reusable instrumentarium

Reusable instrumentarium en sets worden na gebruik vuil aangeboden bij Clinium Amsterdam voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie.

3.3.1 Het vuile instrumentarium dient klaar te staan voor transport in een afgesloten bak of kar, samen met een ingevulde geleidebon.

3.3.2 Vermeld op de geleidebon het volgende;

datum :
naam inzender :
afdeling :
telefoon nummer :
aantal instrumenten of sets met omschrijving

3.3.3 Houd zelf een doordruk of kopie van de geleidebon.

3.3.4 Clinium gebruikt de geleidebon voor haar ingangscntrole. Geconstateerde afwijkingen moet Clinium gelijk melden.
Na reinigen, desinfecteren en/of sterilisatie komt het instrumentarium Retour van Clinium samen met een doordruk of kopie van de originele geleidebon.

3.3.5 Controleer de retour zending aan de hand van de eigen doordruk of kopie van de geleidebon. Teken de eigen geleidebon voor akkoord of vermeld op de bon wat niet klopt en welke actie is ondernomen.
Bewaar alle bonnen minimaal een maand.
Klopt het instrumentarium niet, bel dan gelijk met Clinium en verwijst naar de geleidebon met vermelding van datum, afdeling of bonnummer.

4. Bestemmingen : alle verpleeg- en behandelafdelingen,
kantoor DSMH.

5. Bijlage : geen