

Werkeenheid: C.S.A. Apparaat: Onderhoud en sterilisatie van defibrilator pads	Tot. aantal pagina's : 8 Auteur
---	--

Bekrachtigd door:	paraaf	datum
		18-11-02

Deskundige	registratie/code	bewaarwijze	geldigheidsduur
		Methode	

Onderhoud en sterilisatie van defibrilator pads.

Functie

De defibrilator pads worden gebruikt bij hartfalen van een patiënt.

Onderhoud

Reiniging:

De snoer en de pads moeten handmatig gereinigd worden conform de werkinstructie handmatig reinigen.

Methode van verpakken:

De beide pads moeten afzonderlijk van elkaar (laminaat) verpakt worden om beschadigingen te voorkomen. Daarna kan alles in een (1) pakket tezamen verpakt worden in non - wovon. Gebruik **geen** foodtainer om natte verpakkingen te voorkomen.

Sterilisatie:

De defibrilator pads kunnen gesteriliseerd worden op 134 graden Celsius.

C.S. steriel nummer:

Het nummer in CS. Steriel is;

Storingen

Zitten er duidelijk waarneembare beschadigingen op de pads. Dan mogen deze **niet** meer gesteriliseerd worden. A.U.B. direct doorgeven bij de senior medewerker CSA of bij afwezigheid de senior medewerker OK. Er kan dan direct actie worden ondernomen.

Continuïteit

De defibrilator pads moeten na gebruik **ALTIJD** retour. (ook in het weekend).

Aan het snoer hangt een kofferlabel, waarop aangegeven kan worden hoe vaak het snoer gesteriliseerd is. (volgens de leverancier kan alles maximaal 200 x gesteriliseerd worden).

De kabel niet strak oprollen, dit om beschadigingen te voorkomen.