

<b>Werkeenhed: C.S.A.</b>	<b>Tot. aantal pagina's</b> : 2
<b>Werkinstructie:</b>	<b>Datum</b> : 26-02-03
Handmatig reinigen van hol instrumentarium.	<b>Auteur</b> :
	<b>Versie</b> : 01-2003
	<b>Nummer</b> : 4

<b>Deskundige</b>	<b>registratie/code</b>	<b>bewaarwijze</b>	<b>geldigheidsduur</b>
		Methode	

## Handmatig reinigen van hol instrumentarium.

### Doel

Het reinigen van hol instrumentarium waarvan het niet mogelijk is om deze machinaal te reinigen doordat er een te nauwe lumen in het instrument zit.

### Indicatie

Bij visuele inspectie; geen verontreinigingen aanwezig zijn.

### Benodigdheden

- \* Ultrasoon.
- \* Waterpistool.
- \* Ragers.
- \* Luchtpistool.
- \* Alcoholbak [70%].
- \* Disposable spuit.
- \* Afwasborstel.
- \* Afwasmiddel.
- \* Water.
- \* Handdouche.

### Werkwijze

**- Gebruik voor het handmatig reinigen altijd "schone handschoenen".**

- \* Hol instrumentarium in de ultrasoon doen.
- \* Afspoelen onder de handdouche.
- \* Buitenkant met borstel en Sumaded afnemen.
- \* Afspoelen.
- \* Doorspuiten met het waterpistool.
- \* Ragers in de Sumaded doen.
- \* Hol instrumentarium ragen.
- \* Bij sterke vervuiling nogmaals doorspuiten met waterpistool.
- \* Doorspuiten met het luchtpistool.
- \* Ook de buitenkant moet droog zijn.
- \* Hol instrumentarium in de alcoholbak leggen.
- \* Doorspuiten met alcohol met disposable spuit.
- \* 30 seconden in de alcohol.

---

**Opmerkingen**

- \* Controleren of er geen verontreinigingen meer aanwezig zijn, voordat het instrument in het doorgeefluik wordt geplaatst.

**Voor het specifieke instrumentarium is een overzicht bijgevoegd.**